

Dreh-Sitzkissen Deluxe
Art. Nr. 23513
Bedienungsanleitung



Das **Dreh-Sitzkissen Deluxe** bietet Erleichterung bei der Bewegung der Beine sowie bei Drehbewegungen während des Hinsetzens, Aufstehens und beim Ein- und Ausstieg aus dem Auto, und es ist auch gut für Stühle geeignet. Ideal für:

- Senioren,
- Menschen, sie sich von Operationen oder Verletzungen erholen,
- Menschen mit weniger Kraft in der unteren Körperhälfte.

Eigenschaften:

- Sicher. Das Anti-Rutsch-Material der Unterseite sorgt dafür, dass das Kissen nicht verrutscht
- Der Sitz besteht aus einem komfortablen ultradick gepolsterten Kissen
- Drehung um 360 Grad
- Hygienisch waschbarer und einfach abziehbarer Bezug
- Bezug aus 100 % Polyester (Handwäsche)
- Durchmesser ca.39 cm
- Maximale Belastbarkeit:150 kg

Anwendung:

- Legen Sie das Drehkissen Deluxe auf den Autositz und setzen Sie sich dann hinein.
- Halten Sie sich mit der einen Hand im Innenraum fest und heben Sie Ihre Beine nacheinander in das Fahrzeug.
- Halten Sie sich nun mit beiden Händen fest und nehmen Sie eine bequeme Position ein.

VORSICHT!

Legen Sie das Drehkissen Deluxe nicht auf den Boden – Rutschgefahr! Überprüfen und sichern Sie vor dem Losfahren die Antirutschseigenschaften des Drehkissens Deluxe auf Ihrem Sitz.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 19.10.2013