

1. Die Batterieaufnahme auf der Unterseite öffnen und 2 AA-Batterien einlegen, dann die Aufnahme wieder schließen.
2. Die Silikonspitze wie in der Abbildung gezeigt auf die Schale stecken, dann die Schale auf den Filter setzen. Ihr Ohrenreiniger ist nun einsatzbereit.
3. Gemäß Schritt 2 die Spitze sanft ins Ohr einführen und das Gerät einschalten, um die außen liegenden und sichtbaren Teile des Ohrs zu reinigen.
4. Nach jeder Reinigung den Filter mit der Bürste reinigen, den Filter vor der Reinigung vom Gehäuse abnehmen.

ACHTUNG: VOR DER ERSTEN VERWENDUNG AUFMERKSAM LESEN

1. Vorsicht bei der Reinigung der Ohren. DAS GERÄT NICHT IN DEN GEHÖRGANG EINFÜHREN, DA DIES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN DES OHRS FÜHREN KANN.
2. Bei Überempfindlichkeit oder Schmerz jeglicher Art den Vorgang SOFORT abbrechen. Bei anhaltender Überempfindlichkeit oder Schmerz einen Arzt aufsuchen.
3. Den Ohrenreiniger von Kindern fernhalten.
4. Dies ist KEIN medizinisches Gerät. Es können weder Krankheiten geheilt noch Schmerzen gelindert werden. Personen mit Hörproblemen oder Ohreninfektionen sollten dieses Produkt nicht benutzen.
5. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

